

JONASPORT ATEMLUFTERWÄRMER

Jonasport ist ein Atemluftherwärmer, der das Atmen und Bewegen bei kaltem Wetter erleichtert.

Das aus Edelstahl gefertigte Wärmetauscher-Gitter speichert die Wärme der ausgeatmeten Luft und nutzt sie, um die eingeatmete Luft zu erwärmen. Gleichzeitig befeuchtet das Gitter die trockene Winterluft und macht sie für die Atemwege angenehmer.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Der Jonasport-Erwärmer bleibt dank des Klettbandes sicher an seinem Platz. Führen Sie das geteilte Band hoch genug um den Oberkopf. Der Erwärmer muss sorgfältig vor Mund und Nase platziert werden, ohne die Augen zu bedecken.
2. Das Edelstahlgitter darf nicht abgedeckt werden. Bei Bedarf kann das Gitter leicht gebogen werden, um es den Gesichtszügen anzupassen.
3. Brillenträger können die Metallhalterung an der Oberseite leicht nachbiegen, um das Beschlagen der Gläser zu verhindern. Tritt dennoch Beschlag auf – etwa beim Autofahren oder in anderen potenziell gefährlichen Situationen – ist die Verwendung sofort zu beenden.
4. Das Produkt dient ausschließlich zum Erwärmen der Atemluft und **filtert keine Partikel oder Schadstoffe**.
5. Das Produkt ist **nur für den persönlichen Gebrauch** bestimmt. Nach jeder Benutzung unter fließendem Wasser abspülen. Je nach Gebrauchshäufigkeit 2–3 Mal pro Woche gründlicher mit Flüssigwaschmittel reinigen.
Hinweis: Die weichen Ränder des Erwärmers dürfen nicht über 60 °C erhitzt werden.
6. Der Erwärmer besteht aus **mit Stoff überzogenem Polyethylenschaum, säurebeständigem Edelstahlgitter** sowie **Gummi- und Klettbändern**. Entsorgen Sie das Produkt im **Restmüll**, die Metallteile im **Metallrecycling**.